

## Instrucciones de Uso

### DUPIXENT® (DU-pix-ent) (dupilumab) Inyección para uso subcutáneo

#### Pluma Precargada de Dosis Única (200 mg/1.14 ml)


Las Instrucciones de Uso contienen información sobre cómo inyectar DUPIXENT.

Lea estas Instrucciones de Uso antes de usar la Pluma Precargada de DUPIXENT. **No se inyecte usted mismo ni inyecte a otra persona hasta que se le haya mostrado cómo inyectar DUPIXENT.** Su proveedor de atención médica puede mostrarle a usted o a su cuidador cómo preparar e inyectar una dosis de DUPIXENT antes de que intente hacerlo usted mismo por primera vez. Conserve estas Instrucciones de Uso. Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.


Esta Pluma Precargada de DUPIXENT es solo para uso en adultos y niños mayores de 2 años.

Esta Pluma Precargada de DUPIXENT es un dispositivo de dosis única. Contiene 200 mg de DUPIXENT para Inyección debajo de la piel (Inyección subcutánea). **A continuación, se muestran las partes de la Pluma Precargada de DUPIXENT:**

#### Antes de la Inyección

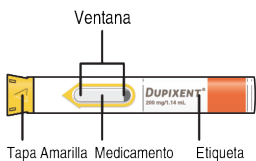

#### Después de la Inyección

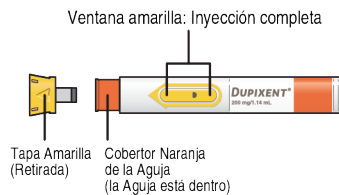

#### Información importante

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar la Pluma Precargada de DUPIXENT.
- Pregúntele a su proveedor de atención médica con qué frecuencia deberá inyectarse el medicamento.
- **En niños de 12 años o más**, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT.
- **En niños de 2 años a menos de 12 años**, DUPIXENT debe ser administrado por un cuidador.
- Elija diferentes lugares de Inyección para cada una.
- **No** presione ni toque el Cobertor Naranja de la Aguja con los dedos.
- **No** inyecte a través de la ropa.
- **No** retire la Tapa Amarilla hasta justo antes de administrar la Inyección.
- **No** intente colocar la Tapa Amarilla nuevamente en la Pluma Precargada de DUPIXENT.
- Tire (deseche) la Pluma Precargada de DUPIXENT usada inmediatamente después de su uso.
- **No** reutilice la Pluma Precargada de DUPIXENT.

## Cómo almacenar las plumas de DUPIXENT

- Almacene las Plumitas Precargadas de DUPIXENT sin usar en el refrigerador a una temperatura de entre 36°F y 46°F (entre 2°C y 8°C).
- Almacene las Plumitas Precargadas de DUPIXENT en su caja original para protegerlas de la luz.
- De ser necesario, puede almacenar las Plumitas Precargadas de DUPIXENT a temperatura ambiente, hasta 77°F (25°C), durante un máximo de **14 días**.
- **No** almacene las Plumitas Precargadas de DUPIXENT a temperatura ambiente de más de 77°F (25°C).
- Después de retirar la Pluma Precargada de DUPIXENT del refrigerador, debe usarse en el plazo de 14 días o tirarla (desecharla).
- **No** agite la Pluma Precargada de DUPIXENT en ningún momento.
- **No** caliente la Pluma Precargada de DUPIXENT.
- **No** congele la Pluma Precargada de DUPIXENT.
- **No** exponga la Pluma Precargada de DUPIXENT a la luz solar directa.
- **Mantenga las Plumitas Precargadas de DUPIXENT y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

## A. Prepararse para inyectarse

### A1. Reunir los suministros


Busque una superficie de trabajo limpia y plana. Asegúrese de tener los siguientes suministros:

- Pluma Precargada de DUPIXENT
- 1 toallita con alcohol\*
- 1 bola de algodón o gasa\*
- Un contenedor para eliminar material punzocortante\* (Consulte el Paso D)

\* Artículos no incluidos en la caja.

### A2. Verificar la Pluma

- **No** use la Pluma Precargada de DUPIXENT si está dañada.
- **No** use la Pluma Precargada de DUPIXENT si Tapa Amarilla no está o no está colocada de manera segura.
- **No** use la Pluma Precargada de DUPIXENT si la Ventana está amarilla antes de usarla.

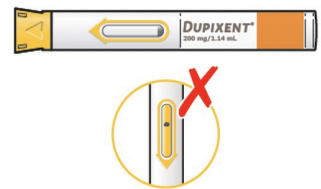

### A3. Observar la Etiqueta

- Verifique que tenga el Medicamento y la dosis correctos.



- Verifique la fecha de vencimiento
- **▲ No** use la Pluma Precargada de DUPIXENT si pasó la fecha de vencimiento.



#### A4. Verificar el Medicamento

- Observe el Medicamento a través de la Ventana: debe estar transparente y variar de incoloro a amarillo pálido.
- **Nota:** es posible que vea una burbuja de aire, esto es normal.
- **▲ No** use la Pluma Precargada de DUPIXENT si el líquido está decolorado o turbio, o si contiene escamas o partículas visibles.




#### A5. Esperar 30 minutos

- Coloque la Pluma Precargada de DUPIXENT sobre una superficie plana y permita que tome temperatura ambiente de menos de 77°F (25°C) durante, al menos, 30 minutos.
- **▲ No** caliente la Pluma Precargada de DUPIXENT en un microondas, con agua caliente o bajo la luz solar directa.




#### B. Elegir y preparar el lugar de Inyección

##### B1. Lavarse bien las manos con agua y jabón

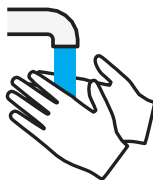


#### B2. Elegir el lugar de Inyección

- **Muslo**
- **Abdomen**, excepto en las 2 pulgadas (5 cm) alrededor del ombligo.
- Un cuidador puede usar también el área exterior de la **parte superior del brazo**.
- Seleccione un lugar de Inyección diferente para cada una.
- **▲ No** coloque la Inyección en piel sensible, lastimada, con hematomas o cicatrices, o en zonas que tengan venas visibles.
- **▲ No** inyecte a través de la ropa.

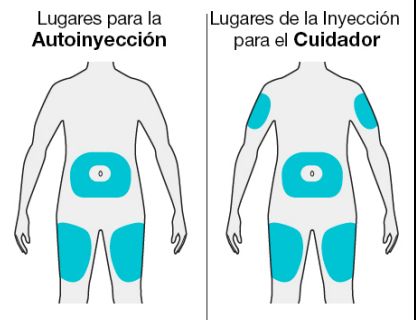

#### B3. Preparar el lugar de la Inyección


- Limpie el lugar de la Inyección con una toallita con alcohol.
- Permita que se seque la piel antes de inyectar.
- **▲ No** toque el sitio de la Inyección de nuevo ni lo sople antes de la Inyección.

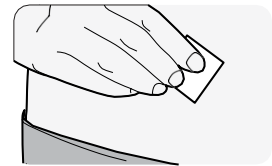


#### C. Colocar la Inyección

##### C1. Retirar la Tapa Amarilla

- Retire la Tapa Amarilla halándola de forma recta, como se muestra. **No** gire la Tapa Amarilla.
- **No** retire la Tapa Amarilla hasta que esté listo para inyectar.
- **No** presione ni toque el Cobertor Naranja de la Aguja con los dedos. La Aguja está dentro.
- **▲ No** vuelva a colocar la Tapa Amarilla en la Pluma Precargada de DUPIXENT después de haberla retirado.

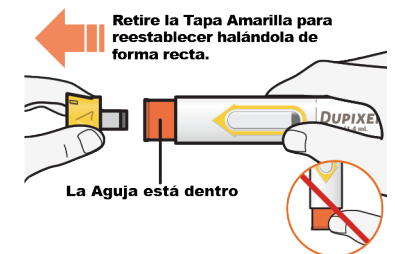

## C2. Pellizque la Piel y Colocación

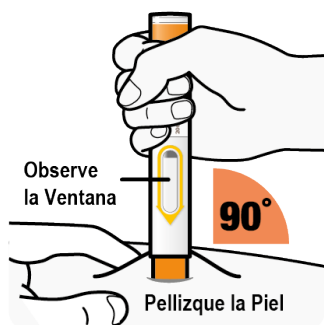

### Pellizque la piel antes y durante la Inyección.

- Sujete la Pluma Preenada de DUPIXENT tal como se muestra, de forma que pueda ver la Ventana. Coloque el Capuchón Naranja de la Aguja sobre la piel.
- Coloque el Capuchón Naranja de la Aguja sobre la piel formando un ángulo aproximado de 90 grados.
- No es necesario pellizcar la piel en caso de adultos y niños mayores de 12 años de edad.

## C3. Presionar → Observar que la Ventana se ponga totalmente amarilla → Luego, contar hasta 5



Presione y mantenga presionada firmemente la Pluma Precargada de DUPIXENT contra la piel **hasta que ya no pueda ver el Cobertor Naranja de la Aguja.**

- Se oirá un “clic” cuando comience la Inyección.
- La Ventana comenzará a ponerse amarilla.
- **Siga presionando** la Pluma Precargada de DUPIXENT contra la piel.

Siga presionando la Pluma Precargada de DUPIXENT contra la piel y observe la ventana:

- La Ventana se pondrá completamente amarilla, y
- Oirá un **segundo “clic”**.
- **Siga presionando** la Pluma Precargada de DUPIXENT contra la piel.

Siga presionando la Pluma Precargada de DUPIXENT contra la piel y **cuente hasta 5 para asegurarse de haber recibido la dosis completa.**


**No es necesario pellizcar la piel en adultos y niños a partir de 12 años de edad.**

## C4. Retirar

- Una vez que haya completado la Inyección, hale hacia arriba de forma recta para retirar de la piel la Pluma Precargada de DUPIXENT. El Cobertor Naranja de la Aguja cubrirá la aguja.
- Si ve sangre en el lugar de la Inyección, presione suavemente una bola de algodón o gasa.
- **▲ No frote** la piel después de la Inyección.

Si la Ventana no se pone completamente Amarilla o si parece que el medicamento sigue saliendo de la pluma, es posible que no haya recibido una dosis completa. Deseche (tire) la pluma y póngase en contacto de inmediato con su proveedor de atención médica.

- **▲ No se coloque** una segunda dosis sin antes hablar con su proveedor de atención médica.

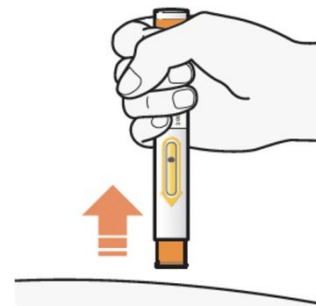

#### D. Desechar la Pluma Precargada de DUPIXENT usada

##### Cómo Desechar (tirar) la Pluma Precargada de DUPIXENT usada

Coloque las Plumas Precargadas y las Tapas Amarillas usadas de DUPIXENT en un contenedor Tapas Amarillas para eliminar material punzocortante aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) inmediatamente después del uso.

▲ **No** deseche (tire) las Plumas Precargadas y las Tapas Amarillas de DUPIXENT en la basura de su hogar.

Si no tiene un contenedor para eliminar material punzocortante aprobado por la FDA, puede utilizar un contenedor que tenga en su hogar que cumpla con las siguientes condiciones:


- sea de plástico de alta resistencia.
- pueda cerrarse con una tapa ajustada resistente a la perforación que impida que el material punzocortante salga del contenedor.
- se mantenga en posición vertical y estable durante el uso.
- sea resistente a las filtraciones.
- esté etiquetado correctamente para advertir sobre la presencia de desechos peligrosos en el interior del contenedor.

Cuando el contenedor para eliminar material punzocortante esté casi lleno, deberá seguir las pautas de su comunidad para desecharlo de la manera correcta. Es posible que existan leyes estatales o locales sobre la manera en que debe desechar las Plumas Precargadas de DUPIXENT. Para obtener más información sobre cómo desechar de manera segura el material punzocortante y para obtener información específica sobre cómo eliminarlo en el estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA:

<http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>

▲ **No** deseche su contenedor para eliminar material punzocortante usado en la basura de su hogar, a menos que las pautas de su comunidad lo permitan.

▲ **No** recicle su contenedor para eliminar material punzocortante usado.

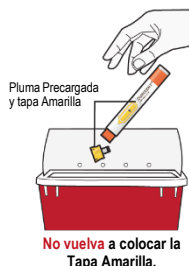

**Mantenga el contenedor para eliminar material punzocortante fuera del alcance de los niños.**

sanofi | REGENERON®

Fabricado por:  
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.  
Tarrytown, NY 10591  
N.º de licencia en los EE. UU. 1760

Comercializado por:  
sanofi-aventis U.S. LLC (Bridgewater, NJ 08807) y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (Tarrytown, NY 10591) DUPIXENT® es una marca comercial registrada de Sanofi Biotechnology.

© 2022 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. / sanofi-aventis U.S. LLC.  
Todos los derechos reservados.

Publicado: Diciembre de 2022

DUP.22.07.0154